

使用後点検記録表

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者

da Vinci Si サージョンコンソール1

機器番号 20 年 月～
davinci

設置場所 医療機器安全管理責任者: 雲母 公貴 製品名: da Vinci Si
 手術室 医療機器安全管理担当者: 江口 洋幸 メーカー: intuitive surgical
 院内医療機器分類: 手術室関連医療機器 型式: SS3000
 ID: クラス分類: 特保・高度管理医療機器 製品番号: 314627

月	日	外装、電源コードに汚れ、破損はないか？	ファイバーケーブルの汚れ、破損はないか？	ステレオビューアを覗き込み、汚れ、破損はないか？	マスターコントローラの汚れ、破損はないか？	サイドボット(左)(エルゴノミクスコントロール)に汚れ、破損はないか？	フットスイッチパネルに汚れ、破損はないか？	備考	サイン

使用後点検記録表

da Vinci Si サージョンコンソール2

機器番号 20 年 月 ~
davinci

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者

設置場所 手術室	ID:	医療機器安全管理責任者:	医療機器安全管理担当者:	院内医療機器分類:	クラス分類:	製品名:	メーカー:	型式:	製品番号:
		雲母 公貴	江口 洋幸	手術室関連医療機器	特保・高度管理医療機器	da Vinci Si	intuitive surgical	SS3000	314628

月	日	外装、電源コードに汚れ、破損はないか？	ファイバークーブルの汚れ、破損はないか？	ステレオビューアを覗き込み、汚れ、破損はないか？	マスターコントローラの破損、汚れはないか？	サイドボット(左)(エルゴノミクスコントロール)に汚れ、破損はないか？	フットスイッチパネルに汚れ、破損はないか？	備考	サイン

※記載終了後は臨床工学科まで提出してください。

使用後点検記録表

da vinci Si ペイシェントカート

機器番号 20 年 月~
davinci

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者

設置場所 手術室
 医療機器安全管理責任者: 雲母 公貴
 医療機器安全管理担当者: 江口 洋幸
 院内医療機器分類: 手術室関連医療機器
 ID: クラス分類: 特保・高度管理医療機器

製品名: da vinci Si
 メーカー: intuitive surgical
 型式: PS3000
 製品番号: 314979

月	日	外装、電源コードに汚れ、破損はないか？	ファイバークーブルの汚れ、破損はないか？	ペイシェントカートのラッチボタンを押した時アームの収納動作は正常か？	収納時の各アームのポジションは正確か？	カードドライブの電源コードはコンセントに接続されているか？バッテリー残量インジケータの表示はフル充電になっているか？	シフトスイッチの切り替えはスムーズに動作するか？	備考	サイン

使用後点検記録表

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者

da vinci Si ビジョンカート

機器番号 20 年 月~

設置場所 手術室
 医療機器安全管理責任者: 製品名:
 医療機器安全管理担当者: メーカー:
 院内医療機器分類: 型式:
 ID: クラス分類: 製品番号:

月	日	外装、電源コードに汚れ、破損はないか？	ファイバークーブルの汚れ、破損はないか？	インスツルメントの使用回数は記載したか？ ネットワークケーブルは抜いたか？	3Dカメラヘッドに汚れていないか、カメラコードに汚れていないか？光源の使用時間は記載したか？	タッチスクリーンモニターの汚れはないか？	気腹装置の汚れはないか、ポンベの残量は大丈夫か？	備考	サイン

※記載終了後は臨床工学科まで提出してください。