

基礎情報

daVinciチェックリスト

CEサイン NO. \_\_\_\_\_

日付 \_\_\_\_\_ カナ \_\_\_\_\_ 身長 \_\_\_\_\_ 体重 \_\_\_\_\_  
 患者ID \_\_\_\_\_ 患者名 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 ○ 男 ○ 女  
 使用科 \_\_\_\_\_ 術式 \_\_\_\_\_ 術者 \_\_\_\_\_

<b>1、準備</b>		<b>7、3Dカメラ・スコープ</b> 注:サブモニターはロールイン時まで2D表示ロールイン後は3D表示	
SC・VC・PCが正しく配置されているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	カメラヘッドに汚れがないか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
SCがロックされフットペダルが下がっているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ホワイトバランス調整を行ったか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
PCのロックがDになっているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	30° スコープの3Dアライメント調整を行ったか(up/down)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
VCがロックされているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	0° スコープの3Dアライメント調整を行ったか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
SC・VC・PCの電源が所定の場所に接続されているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	0° スコープ先端にアライメントタグが挿入されているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<b>2、電源ON・フォーミング</b> SA:システムケーブルを差していない状態		イルミネータをONにしたか(スコープ曇り止め)	
PCをSAで立ち上げアームが干渉しないように広げたか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	<b>8、術中</b>	
アームを広げた後、PCの電源を切ったか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	気腹装置の送気を開始したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
SC・VC・PCをそれぞれシステムケーブル(青)で接続したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	術中3D映像は正常に見えていて録画を開始したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
ONライン用LANケーブルを所定の場所へ接続したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	CO2ボンベの残量を確認したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
それぞれのケーブルに緩みがないか確認したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	リンパ郭清時【14 Davinci】設定にしたか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
VCの電源を入れ正常にシステムが立ち上がるか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	リンパ郭清後【12 Uro LAP】設定に戻したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
看護師ヘッドレーピング開始の報告をしたか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	<b>9、ロールイン・ドッキング</b>	
カメラケーブル固定具ネジの確認	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ロールイン時にカメラアームのスイートスポットの矢印が真ん中にあるか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
カメラアームキャリッジのベアリングの歪み	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ロールイン時にカメラアームが支柱に対して真っ直ぐになっているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
カメラアームキャリッジのダンパーの有無	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ドッキング時にスイートスポット内に矢印があるか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
カメラレンズの汚れ	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ドッキング時にアーム間が拳1つ空いているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
ビューアレンズの汚れ	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ドッキング時にカメラのライトケーブルを所定の場所に取り付けているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<b>3、電気メス設定</b>		<b>10、ロールアウト</b>	
電気メス本体にVCからのケーブル(BI・MO)が接続されているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ストラップを外したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
電気メス設定【12a Uro LAP】設定にしたか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	DVD録画を終了したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<b>4、気腹装置</b>		<b>11、術後</b>	
CO2ボンベバルブを開けたか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	インストールメントアーム使用回数の報告	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
CO2ボンベの残量及び予備を確認したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	ランプ稼働時間(1000hr以内)	hr
電源を入れ各種設定を行ったか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	症例報告書のコピーを受け取ったか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
排煙フットSWは正常に動作するか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	装置に破損・汚れはないか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<b>5、録画準備</b>		カメラケーブル固定具ネジの確認	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
映像モニターへのケーブルを所定の場所へ接続したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	カメラアームキャリッジのベアリングの歪み	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
DVD装置の電源を入れ設定したか(DVDを入れたか)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	カメラアームキャリッジのダンパーの有無	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
3D映像は正常に見えているか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	カメラレンズの汚れ	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<b>6、ドレーピング</b>		ビューアレンズの汚れ	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
ディスクノッチ位置を確認したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	DVDをファイナライズし医師に渡したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
ストラップの位置を確認したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	アームを畳んだ後PCの電源を切ったか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
エラー分類 <input type="text"/> ▼	▼	ケーブル類に破損・汚れはないか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
エラー内容	備考	SC・VC・PCを所定の場所へ戻したか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<input type="text"/>	<input type="text"/>	PCの電源を接続したか(充電)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<input type="text"/>	<input type="text"/>	SC・VC・PCをロックしたか	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
<input type="text"/>	<input type="text"/>		